

KATALOG PRODUKTOWY

THE BEAUTY OF THREADS BY



IAAM
AESTHETIC MEDICINE

IAAM Sp. z o.o, ul. Marszałkowska 6/4a,
00-590 Warszawa
e-mail: biuro@iaam.pl
tele. biuro: (+48) 453 324 535



Onas

IAAM to firma której celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, ustanawiając nowe standardy w branży. Wierzymy, że oferowane przez nas produkty spełniają oczekiwania i inspirują do pozytywnych zmian. Zaawansowane technologie, jakość i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze, dlatego jesteśmy jedynym dystrybutorem na rynku Polskim nici liftingujących firmy Whiterose, które posiadają certyfikaty jakości i bezpieczeństwa na całym świecie m. in. w USA, Europie, Meksyku, Rosji czy Korei Pd.



WHITEROSE dostarcza lekarzom medycyny estetycznej różnorodne, w pełni biodegradowalne nici o różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, w tym PDO, P(LAVCL).

Produkty Whiterose są wytwarzane, sterylizowane i przygotowywane na bieżąco w Korei Południowej, a następnie wysyłane drogą lotniczą bezpośrednio do naszego magazynu w Polsce, dzięki temu utrzymują najwyższą jakość.

Nici Whiterose drugi rok z rzędu zdobyły główną nagrodę w kategorii „wyrób medyczny” w konkursie dla najlepszej marki w Korei 2022.



Rewitalizacja

PRO LINE

MONO PRO Gładka nić PDO/P(LA/CL) owinięta wokół igły, zapewniająca dodatkową stymulację kolagenu po każdym wkłuciu. Składa się z jednego lub dwóch skręconych stałych włókien, które stopniowo rozpuszczają się w tkance. Ten proces sprawia, że efekty zabiegu są stopniowe i naturalne. Nić polecana do wykorzystania w protokołach łączonych.

Wskazania:

- Zmarszczki w okolicach oczu: Wygładza skórę wokół oczu, zagęszcza, rewitalizuje i poprawia kondycję skóry.
- Cera matowa, przebarwiona, pozbawiona blasku: Redukuje przebarwienia, plamy pigmentacyjne i nierówny kolor, nadaje skórze promiennego blasku.
- Zmarszczki: Redukuje zarówno drobne linie, jak i głębsze zmarszczki.



Pro Line

Mono Pro



USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
6-0	30G*25mm	30mm	Sharp
	30G*38mm	50mm	Sharp
	29G*25mm	30mm	Sharp
	29G*38mm	50mm	Sharp
	29G*50mm	75mm	Sharp
	29G*60mm	90mm	Sharp
5-0	27G*38mm	50mm	Sharp
	27G*50mm	75mm	Sharp
	27G*60mm	95mm	Sharp
	27G*90mm	150mm	Sharp
	26G*60mm	90mm	Sharp
	26G*90mm	150mm	Sharp



PRO LINE

SCREW PRO Gładka nić PDO owinięta spiralnie wokół igły. Dzięki tej technice nawinięcia, nić wkręca się w tkankę i skutecznie pozostaje w punkcie aplikacji, przez co każde wprowadzenie nici jest jeszcze bardziej skuteczne i daje lepszy efekt w porównaniu z wprowadzaniem nici Mono.

Wskazania:

- Zmarszczki palacza: Zwalcza zmarszczki palacza, przywracając skórze wokół ust jędrność i poprawiając jej strukturę.
- Zła kondycja szyi i dekoltu: Poprawia kondycję skóry zapewniając efekt jędrności i rewitalizacji.
- Głębokie zmarszczki : Redukuje głębokie zmarszczki oraz łwią zmarszczkę.



Pro Line

Screw Pro



USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
6-0	29G*25mm	30mm	Sharp
	29G*38mm	50mm	Sharp
	29G*50mm	75mm	Sharp
	29G*60mm	90mm	Sharp
5-0	27G*38mm	50mm	Sharp
	27G*50mm	75mm	Sharp
	27G*60mm	95mm	Sharp
	27G*90mm	150mm	Sharp
	26G*60mm	90mm	Sharp

Wypełnienie

VOLUME UP LINE

VOLUME UP BASIC Wytłaczana nić PDO, która została specjalnie skonstruowana z myślą o zabiegach mających na celu doskonalenie struktury, gęstości oraz elastyczności delikatnej skóry. Jej zaawansowana konstrukcja pozwala na eliminację migracji z punktu wprowadzenia. Skręcona struktura nici sprawia, że doskonale sprawdza się w przywracaniu objętości obszarom twarzy o skórze, która straciła jędrność i elastyczność.

Wskazania:

- Drobne linie i zmarszczki na twarzy: Redukuje i wygładza drobne linie i zmarszczki na skórze szyi, policzkach oraz obszarze czoła.



Volume Up Line Volume Up Basic



USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
5-0	27G*38mm	50mm	Sharp
	27G*50mm	75mm	Sharp
	27G*60mm	90mm	Sharp
	27G*90mm	150mm	Sharp
	26G*60mm	90mm	Sharp
	26G*90mm	150mm	Sharp
4-0	25G*38mm	50mm	Sharp
	25G*60mm	90mm	Sharp
	25G*90mm	150mm	Sharp
3-0	23G*38mm	50mm	Sharp
	23G*60mm	90mm	Sharp
	23G*90mm	150mm	Sharp



VOLUME UP LINE

VOLUME UP SCREW Wypukła, tłoczona, potrójnie spleciona nić, precyzyjnie owinięta na całej długości igły. Kształt śruby jest doskonale utrzymany nawet po wprowadzeniu nici pod skórę, co eliminuje migrację z punktu wkłucia oraz nadaje dodatkowej objętości.

Wskazania:

- Opadające brwi: Precyzyjnie podnosi brwi.
- Zmarszczki: Skutecznie redukuje widoczność zmarszczek.
- Nieregularny kształt nosa: Precyzyjnie koryguje kształt nosa.
- Utrata jędrności skóry twarzy: Modeluje i koryguje kształt twarzy.
- Nieregularny kontur ciała: Modeluje i poprawia kontur sylwetki w sposób nieinwazyjny.
- Podwójny podbródek: Redukcja podwójnego podbródka.



Volume Up Line Volume Up Screw



USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
6-0	29G*25mm	30mm	Sharp
	29G*38mm	50mm	Sharp
	29G*50mm	75mm	Sharp
	29G*60mm	90mm	Sharp
5-0	27G*38mm	50mm	Sharp
	27G*50mm	75mm	Sharp
	27G*60mm	95mm	Sharp
	27G*90mm	150mm	Sharp
	26G*60mm	90mm	Sharp
	26G*90mm	150mm	Sharp



MESH

Mesh Konstrukcja siateczki pozwala na jednoczesną implantację (8) nici, eliminując konieczność stosowania wielu nici w deficytowych obszarach twarzy i ciała. 8 nici PDO splecionych jest w siateczkową strukturę z tępą kaniulą 19G. Ten splot gładkich nici drastycznie zwiększa powierzchnię styku struktury nici po włożeniu, aby zmaksymalizować stymulację produkcji kolagenu i efekt objętości.

Wskazania:

- Asymetria twarzy: Koryguje wszelkie asymetrie w strukturze twarzy.
- Opadające policzki i linia żuchwy: Skupiając się na obszarach, gdzie skóra może ulegać wiotczeniu, poprawia elastyczność skóry, rewitalizując opadające policzki oraz linię żuchwy.
- Średniej głębokości bruzdy: Redukuje widoczność średniej głębokości bruzd.
- Utrata jędrności i napięcia skóry: Dostarcza efekt liftingu.



Mesh



USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
2	19G*38mm	50mm	L-type
	19G*60mm	80mm	L-type



Nici typu Cog - konturowanie

NOSE LINE

NOSE COG Nici z haczykami są specjalnie zaprojektowane do konturowania nosa. Ta specjalna nić PDO wykorzystuje dwukierunkową konstrukcję haczyków. Nić jednostronna, służąca do stabilnego zakotwiczenia w tkankach. Nose Cog wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną kaniulę L-tępą 19G, która bezpiecznie penetruje strukturę nosa, zapewniając naturalnie wyglądające rezultaty.

Wskazania:

- Nieregularna końcówka nosa: Precyzyjne kształtuje i definiuje końcówkę nosa.
- Wysoki nos: Korekta w przypadku nosów o wyraźnie wyższym grzbiecie.
- Dostosowuje proporcję nosa do reszty twarzy.
- Opadający czubek nosa: Delikatnie unosi lub dostosowuje kształt czubka nosa, eliminując ewentualne asymetrie.
- Zaokrąglone boki nosa: Redukuje zaokrąglone boki nosa.



Nose Line Nose Cog



USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
2	19G*38mm	50mm	L-type
	19G*50mm	70mm	L-type



Lifting


COG LINE

360° 6D CUTTING COG Nici z haczykami rozłożonymi wokół całej ich długości, co umożliwia równomierne i stabilne uchwycenie tkanek podczas zabiegu. Haczyki mają specjalnie zaprojektowane kolce tnące z dwukierunkowym gwintem (Gwinty 360° 6D), które pomagają w delikatnym przemieszczaniu tkanek i pobudzaniu produkcji kolagenu. Nici zapewniają wysoką wytrzymałość na rozciąganie i wiele punktów do mocowania. Nici Cog 360° 6D wykorzystują tępą kaniulę zawierającą gąbkę, która utrzymuje gładki koniec kolczastej nici co gwarantuje bezpieczne wprowadzenie jej w głęboką, podskórną warstwę skóry. Po wprowadzeniu kaniuli, nić znajdująca się w jej wnętrzu umieszczana jest pod skórą. Nici 360° 6D Cutting Cog to dwuwarstwowa metoda cięcia nici PDO, która zapewnia silniejszy efekt zakotwiczenia skóry niż zwykłe nici kolczaste.



Wskazania:

- Starzenie się skóry: Minimalizuje widoczne oznaki starzenia, spowalnia fazy postępu, a nawet odwraca niektóre jej efekty. Poprawia elastyczność i jędrność skóry.
- Nieregularny kontur twarzy: Precyzyjne unosi i ujędrnia obszary, takie jak: kości policzkowe, linie żuchwy czy obszar szyi.
- Bruzdy nosowo-wargowe: Poprzez uniesienie tkanek wokół tej strefy, procedura pomaga w wygładzeniu i zredukowaniu widoczności bruzd.

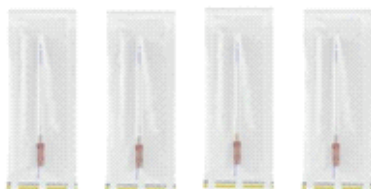

Cog Line 360° 6D Cutting Cog

USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
2-0	21G*60mm	115mm	Blunt W Type
	21G*90mm	145mm	Blunt W Type
	21G*38mm	90mm	Blunt L Type
	21G*60mm	115mm	Blunt L Type
	21G*90mm	145mm	Blunt L Type
	20G*60mm	115mm	Blunt L Type
	20G*100mm	160mm	Blunt L Type
	21G*60mm	100mm	45° D Type
	20G*60mm	100mm	45° D Type
	20G*100mm	150mm	45° D Type
1-0	19G*60mm	115mm	45° D Type
	19G*100mm	150mm	45° D Type
	19G*60mm	115mm	Blunt L Type
	19G*100mm	150mm	Blunt L Type
	19G*60mm	110mm	Blunt W Type
	19G*100mm	150mm	Blunt W Type
2	18G*100mm	150mm	Blunt W Type




COG LINE

PRESS MOLDING COG V1 Formowane nici V1 PDO / P(LA/CL) wykorzystują kombinację połączeń tępej kaniuli W 18G/19G i nici z kolcem. Nici typu Molding są wytwarzane poprzez włączanie do specjalnie zaprojektowanych form bez ich uszkodzania. W ten sposób nasze nici wykazują doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i efekt kotwiczenia w porównaniu do zwykłych nici typu cutting cog (cięte) innych producentów.

Wskazania:

- Utrata wolumetrii twarzy: Dodaje objętość różnym obszarom twarzy.
- Początkowe oznaki starzenia się skóry: Subtelne odmładza rysy twarzy, poprzez ujędrnienie i uniesienie skóry. Procedura ta skierowana jest na redukcję widoczności zmarszczek, a także modelowanie konturów.

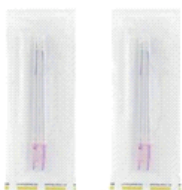

Cog Line Press Molding Cog V1



USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
2	19G*60mm	110mm	Blunt W Type
	19G*100mm	150mm	Blunt W Type
	18G*100mm	150mm	Blunt W Type




COG LINE

PRESS MOLDING COG V2 Formowane nici V2 PDO / P(LA/CL) wykorzystują tępą kaniulę do ostrożnego wprowadzenia wchłanialnej nici kolczastej w głębokie, podskórne warstwy skóry.

Dwukierunkowe kolce, tworzą doskonałą wytrzymałość w tkankach. Nici typu Molding są wytwarzane poprzez wtlaczanie do specjalnie zaprojektowanych form bez ich uszkodzenia. W ten sposób nasze nici wykazują doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i efekt kotwiczenia w porównaniu do zwykłych nici typu cutting cog (cięte) innych producentów.

Wskazania:

- Utrata wolumetrii twarzy: Dodaje objętość różnym obszarom twarzy.
- Początkowe oznaki starzenia się skóry: Subtelne odmładza rysy twarzy, poprzez ujędrnienie i uniesienie skóry. Procedura ta skierowana jest na redukcję widoczności zmarszczek, a także modelowanie konturów.

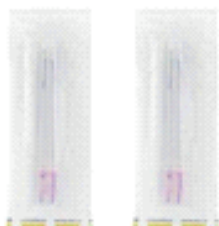

Cog Line Press Molding Cog V2

USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
2	19G*60mm	110mm	Blunt W Type
	19G*100mm	150mm	Blunt W Type
	18G*100mm	150mm	Blunt W Type




COG LINE

MOLDING COG FOX EYE Formowane nici z tzw. "kolcami" Fox Eye wykorzystują nowe technologie V1 i V2, które są dwukierunkowymi haczykami skierowanymi w przeciwnych kierunkach, tworząc doskonałą wytrzymałość w tkankach, a także znakomite przyleganie do tkanki, dzięki czemu efekt liftingu pozostaje na miejscu i jest łatwo kontrolowany przez osobę wykonującą zabieg. Nici Fox Eye wykorzystują połączenie tępej kaniuli 21G i formowanej nici z kolcem. Nici tego typu są wytwarzane poprzez wciśnięcie do specjalnie zaprojektowanych form bez ich uszkodzenia. W ten sposób nasze nici wykazują doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i efekt zakotwiczenia w porównaniu do zwykłych nici cutting cog innych producentów.



Wskazania:

- Opadające powieki - Podniesienie powiek, powiększenie szpary powiekowej.
- Nisko osadzone brwi - Uniesienie brwi.
- Dążenie do efektu Foxy Eyes - Uniesienie zewnętrznych kącików oczu.
- Zmarszczki w okolicach oczu – wygładzenie i redukcja zmarszczek w danym obszarze.

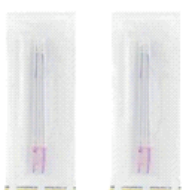

Cog Line Molding Cog FOX EYE

USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
2-0	21G*60mm	115mm	W-type
	21G*90mm	145mm	W-type



Lifting brwi

EYE & LIP LINE

EYE & LIP CANNULA Kaniuła gładka to nasz najkrótszy i najcieńszy rozmiar nici (30 g x 25 mm). Kaniulę gładką można stosować na mniejszych obszarach twarzy takich jak: pod oczami, w okolicach skroni i ust oraz na czole. Może być skutecznie łączona z innymi nićmi ze specjalistycznej serii WHITEROSE THREADS, aby osiągnąć efektywny boczny lifting brwi.

Wskazania:

- Zmarszczki mimiczne: Redukowanie i wygładzanie zmarszczek mimicznych. Procedura umożliwia precyzyjne uniesienie skóry, eliminując widoczność linii mimicznych, szczególnie w obszarze oczu, czoła i ust.
- Worki pod oczami: Niwelowanie worków pod oczami poprzez podniesienie i ujędrnienie skóry w tej delikatnej strefie. Procedura przyczynia się do redukcji opuchlizny.



Eye & Lip Line Eye & Lip Cannula

USP Size	Needle Size	Thread Size	Needle Type
6-0	30G*25mm	35mm	W-type



Rodzaje nici:



Gładkie




Tłoczone



Cięte

Rodzaje igieł:


- Kaniula typu Sharp, kaniula typu 45 D, kaniula typu W, kaniula typu L. Te cztery typy igieł zapewniają grubsze i mocniejsze poprowadzenie szwu, co skutkuje zwiększeniem produkcji kolagenu.
- Specjalna powłoka kaniuli o mniejszym ścieraniu umożliwia gładkie wprowadzenie, zmniejsza ból i minimalizuje uszkodzenie tkanki.

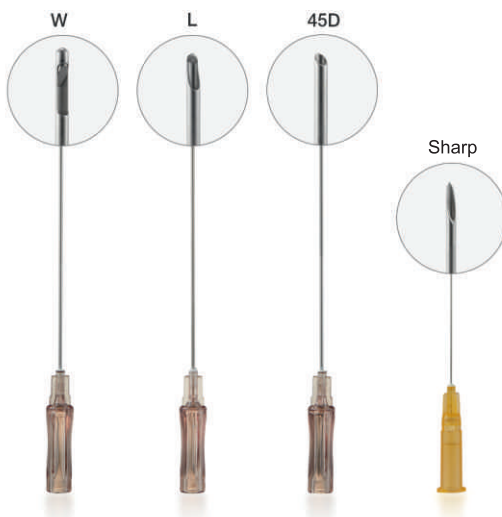



01

Od początku tworzenia, aż po pakowanie do wysyłki, **nici Whiterose zarządzane są ściśle przez jednego producenta** Dongwong medical aby zapewnić najwyższą jakość produkcji.

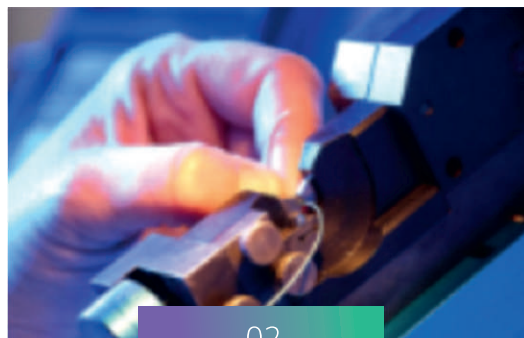


02

Przestrzegamy wszystkich wytycznych dotyczących produkcji jednorazowych wyrobów medycznych dla zachowania wysokiego bezpieczeństwa pacjenta.



03

Nici Whiterose po sterylizacji nigdy nie są ponownie użyte.

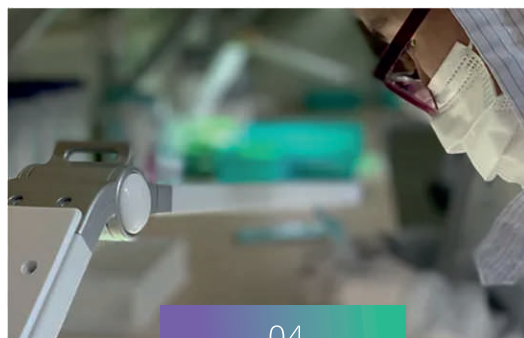


04

Aby wyeliminować możliwość ponownego użycia po otwarciu opakowania nici **firma zrezygnowała z zamka wielokrotnego użytku** zapewniając tym jak najwyższe normy bezpieczeństwa i skuteczności produktu.



IAAM
AESTHETIC MEDICINE

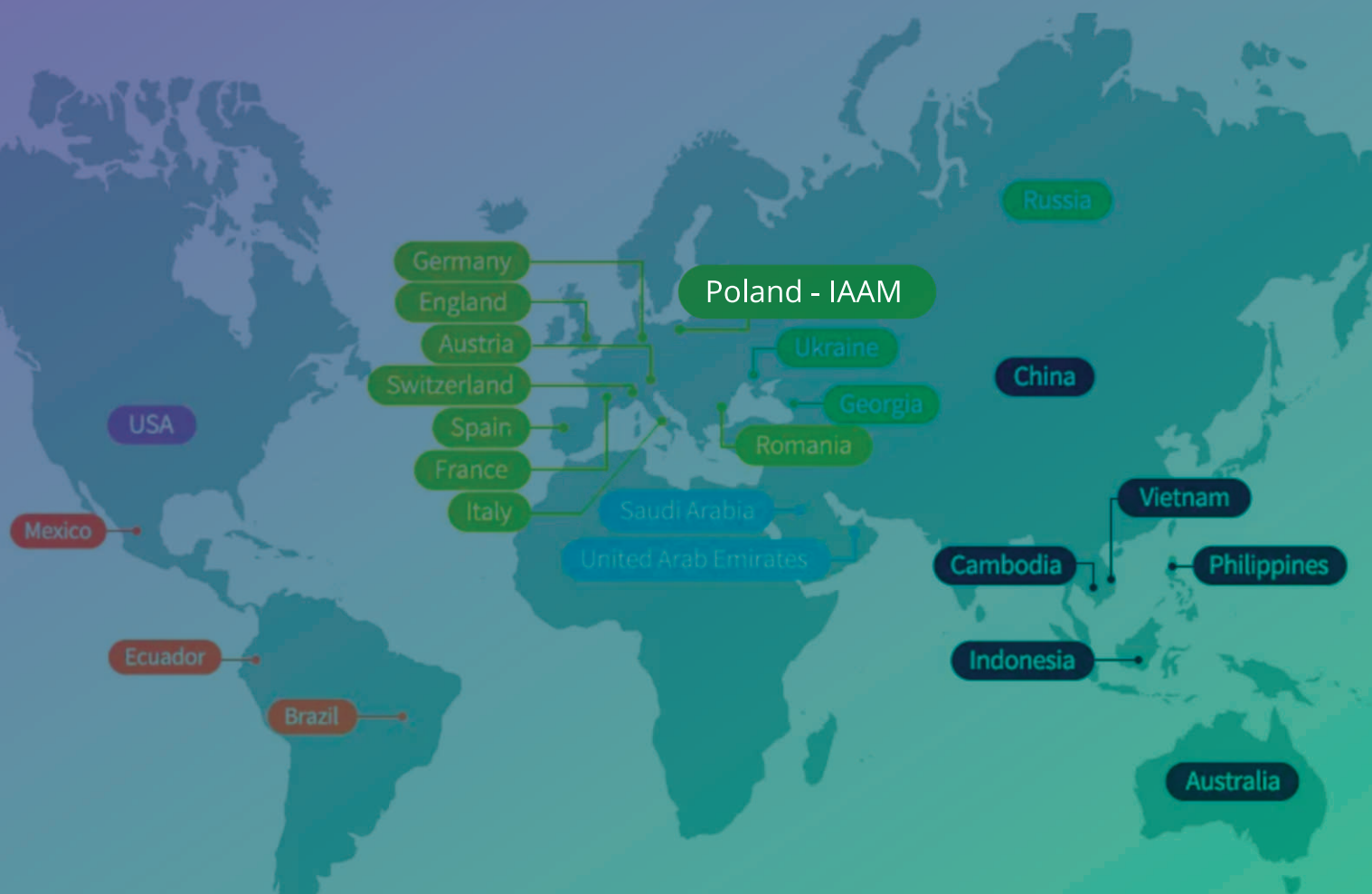

IAAM Sp.z o.o.
ul. Marszałkowska 6/4a
00-590 Warszawa, Polska
Kom: (+48) 453 324 535
E-mail: biuro@iaam.pl

 IAAM Aesthetic Medicine
 [iaam_aesthetic_medicine](https://www.instagram.com/iaam_aesthetic_medicine)